

**COMITE NACIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE LA INFLUENZA PANDÉMICA.  
24-4-2009**

**INSTRUCTIVO DEL KIT DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA INFLUENZA EPP Kit /swine flu )  
Recomendado por la O.P.S.**

**Contenido del Kit:**

1. Dos Mascarillas de Bioseguridad N95 (NIOSH) recomendada para la protección de agentes bioinfecciosos.
2. Una bolsa de recolección de desechos biológicos, para el descarte del equipo luego de su uso.
3. Un Lentes de seguridad química de poli carbonato
4. 6 sobres de esponjas con material desinfectante BZK 1:250 (Benzal Konium Choride)
5. Dos pares de guantes de nitrilo
6. Una bata de plástico desechable

**MODO DE COLOCACIÓN**


**1** Lávese y seque las manos y colóquese los guantes no dejando pliegues, use doble guante por mano.

**2** Con las manos enguantadas, colóquese la bata plástica y/o tela a su cintura

**3** Colóquese el tapaboca procurando que tape la nariz y la boca, ajuste la lámina de apoyo nasal y ajuste las cintas a su cráneo.

**4** Colóquese los lentes sobre sus ojos, cubra los pliegues anatómicos y ajuste las cintas a su cráneo.

**5** Se recomienda cubrir el pliegue de la manga y el guante con cinta adhesiva impermeable.

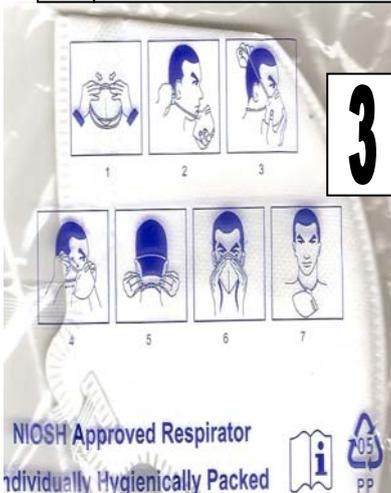

**Recomendaciones durante el uso:**

- Evite tocarse la mascarilla, lentes o partes corporales expuestas una vez colocado el equipo, concéntrese en realizar la tarea asignada.
- Tengo cuidado al manipular objeto o superficies cortantes durante la labor
- Desplácese con precaución los lentes y mascarillas le limitaran la visión periférica, si coloca los lentes muy ajustarlos pueden causarle molestias o pueden empañarse.
- Evite estornudar con la mascarilla puesta.

**Proceso de descarte del material:**

1. Luego de realizar la actividad con el paciente o el material presuntamente contaminado, limpie los guantes y las superficies expuestas con las esponjas desinfectantes.
2. Retire los lentes, luego el tapa boca, la bata y de ultimo los guantes. Los guantes deben retirarse de una mano por el pliegue de la muñeca externo y embolsar en su interior el guante de la mano contraria para evitar tocar la superficie de los mismos.
3. Coloque el material en la bolsa de desechos biológicos y agrégueles 5,0cc de solución de Hipoclorito de Sodio al 4,5 %.
4. Cierre la bolsa con un cordel y descártelo con los desechos hospitalarios, de tipo "C", solicite información al personal del Ministerio de Salud cercano (MPPS) para su disposición final.